

Logar oxálsav szublimáló

Oxálsav-dihidrát párologtatására használható készülék.

Az eszközzel egy óra alatt mintegy 60–80 család kezelése végezhető el.

Használati útmutató:

- 1/ Bizonyosodjon meg az elektromos rendszer jó állapotáról
- 2/ Viselje a javasolt védőöltözetet (UP3 típusú védőmaszk, szemüveg, kesztyű és védőruházat saválló gumiból)!
- 3/ Csavarja le az üveg borítást és a készülék belsejében levő tartályt töltsse fel a kívánt mennyiségű oxálsavval (max. 50 gramm), majd csavarja vissza a borítást!
Csakis kristályos, nem-folyékony oxálsavat használjon!
- 4/ Csatlakoztassa a melegítőt (kb. 2000 W) a párologtatóhoz és a 220 v-os csatlakozóhoz (legalább 2 kW-os generátor is használható) .
- 5/ Kapcsolja a melegítőt 2 vagy 3 fokozatra, majd állítsa max. hőfokra (630 °C)!
Megkezdődik a párologtatás. Várjon pár percet, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet (kb. 300° C)!
- 6/ Vezesse be a készüléket a kaptárkijáróba, hagyja kb. 15 másodpercig! A kezelés végén nem szükséges lezárni a kaptárt.
- 7/ A munka végeztével kapcsolja le a melegítőt, húzza ki a készüléket a csatlakozóból és tisztítsa meg a maradványoktól.

Figyelem: a teljes lehűlés és tisztítás előtt ne hagyja a készüléket zárt környezetben (dobozban) !

A védőruházatot tisztítás közben is viselje!

A gép ne kerüljön kapcsolatba nagyon párás levegővel, vagy folyadékkal, mert ezek károsíthatják!