

Furetto varroa atka elleni porlasztó használati útmutató

A Furetto könnyű, egyszerűen kezelhető, könnyen tölthető és adagolható, „egykezes” eszköz. A gőzösítés, porlasztás elvén működik. A spirálcövet gáz fűti, amelybe a befecskendezett anyag gőzzé, füstté alakul és ezt a szerkezet végén lévő fűvókán keresztül a kaptár bejárójába fújja. A Furetto mikroszkopikus részecskékre porlasztja az anyagot, a mikron tizedére. Erre azért van szükség, hogy a kaptár minden részébe eljusson, így a méhfűrtben is hasson az atka ellen. Az adagoló gomb egyszeri megnyomásával, egy méhcsalád kezelésére elegendő szert porlaszt szét. Pontosan ennyi kell a hatásos védekezéshez. A folyamat 5 másodpercet vesz igénybe. A spirálcső a 190 grammos egyszer használatos gázpalackról melegszik fel.

Használati utasítás: Csavarja le a gázpalacktartó műanyag dobozt (piros színű). Helyezze bele a gázpalackot, majd csavarja vissza. Ellenőrizze a tömítettséget. Töltse fel a hatóanyagtartályt (sárga színű 1 literes, piros színű 2 deciliteres) és csavarja vissza. A hatóanyagot csak közvetlenül a kezelés előtt készítse el. A vivő anyag kizárólag könnyű tisztított petróleum lehet, más anyag használata tilos! A szállítási dugót ne helyezze be a készülék működtetése közben, mert a hatóanyagtartályban vákuum keletkezik ezért folyamatosan kisebb-kisebb mennyiség jut a kaptárba. A szállítási dugót a kis hatóanyagtartályban egy nylon tasakban találja, ezt csak akkor használja, ha a hatóanyagot a tartályban szállítja.

Javasolt hatóanyag keverékek:

	1 literes tartályhoz:	2 deciliteres tartályhoz:
Taktik	50 ml 1000 ml petróleum	Taktik 10 ml 200 ml petróleum
Mitac	36 ml 1000 ml petróleum	Mitac 7,2 ml 200 ml petróleum

Más hatóanyagok is használhatóak annak megfelelő keverékével, kivéve maró, agresszív anyagok! (pl.: tejsav)

A készülék beindítása: távolítsa el a záró gumilap közepéből a szállítási dugót, hogy ne keletkezzen vákuum a hatóanyagtartályban. Nyissa ki a gázszelepet, közben gyújtsa be öngyújtóval a fekete borítórács alatt az égőtestet. A begyűjtött Furetton melegítse fel. Helyezze a porlasztót a kaptár kijárójába vagy erre a célra készített furatba. Nyomja meg a készülék fogantyújába beépített sárgaréz adagoló gombot és engedje el. A hatóanyag a fűtött spirálcsőbe jut és porlasztva a kaptárba fújja, 5 másodperc alatt. A következő kaptárnál a folyamatot ismétlje újra!

Javasoljuk, A spirálcövet csak a szükséges mértékben melegítse, a láng ne égjen túl a gázégő védőrácson. A spirál ne izzon fel pirosra, a spirálcső színe csak fekete és a mélybordó között lehet. (Ez sötétben jobban látható) A túlzott fűtéssel csökken a spirálcső élettartama (revésedés, eldugulás), a gázpalack lefagyhat. Normál jó használati körülmények között a spirálcső 10-12 évig működik az Ön meglegedésére. Javasoljuk, hogy fiasítás mentes időszakban védekezzen, +12 C fok felett, egy kaptárba csak egyszer nyomja meg az adagoló gombot. Csak felhasználás előtt készítse el a szert, ajánlott méztéri fiókok nélküli családoknál használni.

Jó tanács: A fűvókát szükség szerint tisztítsa. Használat után a hideg készüléket tiszta petróleummal mossa át és hagyja benne a spirálcsőben. A hatóanyag tartályt ürítse ki és törölje szárazra.

Természetes elhasználódás a készüléknél: a pumpabőr – a bőrtömítést javasolt két évente cserélni a megfelelő mennyiség kijuttatása érdekében -

Munkavédelmi előírások: Védőkesztyű és megfelelő védőmaszk használata kötelező! Zárt térben nem alkalmazható!

Balesetvédelmi előírások: Tilos a készüléket emberekre irányítani és működtetni! Figyelem: a borítórács érintése égési sérüléseket okozhat!

Tűzvédelmi előírások: Gyúlékony anyagok közelében ne használja (pl.: száraz avar). A készülékben keletkező füstgőz nyílt láng közelében vagy a keretlécnek ütközéskor belobbanhat.

Figyelem: A gázpalackot eltávolítani a készülékből csak teljesen üres állapotban, nyílt helyen szabad.

- A palackot soha ne cserélje ki láng vagy izzó hőforrás közelében,
- Mielőtt új palackot helyezne be mindig zárja el a gázszabályzó szelepet.

Tilos a palackot vagy a palacktartót olyan magas hőmérsékletnek kitenni (pl.: forró víz, nyílt láng, stb.), amely a palacktartót deformálhatja.

Palack cseréje: Csak olyan palackot használjon, amely lazán illeszkedik a palacktartóba, nem szorul. Tilos az olyan palack használata, amely szorul a palacktartóban, mert tűz-, baleset- és életveszélyes lehet.

- Csavarja le a palacktartó műanyagot (piros), és vegye ki az üres palackot,
- Helyezze be a palacktartóba az új teli gázpalackot
- Csavarja fel teljesen a palacktartót, a palackot a készülékben lévő lyukasztótű nyitja ki, és a gázpalackon lévő szelepet nyitja
- Vigyázzon, hogy párhuzamosan illessze a két menetet össze
- Ellenőrizze a készülék gáztömítettségét.

A készüléket kizárólag, mozgásában és szellemiében nemkorlátozott felnőtt személy üzemeltetheti, megfelelő szakképesítéssel, munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi felkészültséggel.

A készülék anyagellátását, szervizelését cégünk folyamatosan vállalja.

Kérjük, a készülékkel kapcsolatos észrevételeit, tanácsait, javaslatait jelezze.

Gyermekek előtt a készüléket el kell zárni!