

# VARROX EDDY

## A csomag tartalma:

- 1 Varrox EDDY oxálsav szublimáló készülék 1 adagoló karral
- 1 akkumulátor
- 1 akkumulátor töltő
- 2 db fém tégely
- 1 hordtáska
- Használati útmutató

## A KÉSZÜLÉK:

Kiváló minőségű, egyedi szublimáló kompakt gép, beépített akkumulátorral, mely az oxálsav szublimálásával hatékony kezelést nyújt a kaptárban található varroa atkák ellen.

Különösen hasznos, mivel időt spórol, ha egyszerre több családot kell lekezelnie.

- Kipróbált és megbízható márka
- Tartós, egyedi tervezés, mely időtálló
- Egy gombos vezérlés az egyszerű kezelésért
- A beépített lithium Ion technológia kompakt és hordozható energiát biztosít
- A kifinomult Led-es világítási rendszere pontos utasításokat ad használat közben

## Használata:

A Varrox EDDY oxálsav szublimálására alkalmazható eszköz.

- 1., Ellenőrizze, hogy a Varrox EDDY akkumulátora teljesen fel van e töltve, csatlakoztatva azt a töltőhöz. A teljes töltés kb. 4 óra, mely 10-15 család kezeléséhez elegendő. Az akkumulátor LED kijelzője megmutatja, hogy mennyi energia maradt az akkumulátorban.
2. Az EDDY bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, míg a LED zöld fényre nem vált, ami azt jelenti, hogy a készülék készen áll a kezelésre.
3. Rakja a szükséges mennyiségű oxálsav hidrátot a tégelybe és helyezze a Varrox EDDY adagoló karjába.
4. Tolja be a készüléket a kaptár aljába, a kirepülő nyíláson keresztül, ameddig a kar engedi.
5. Zárja le a kirepülő nyílást ruhával, hogy biztosítani tudja a kezelés hatékonyságát. Győződjön meg arról, hogy a kaptárban lévő összes nyílás zárva van, beleértve a nyitott hálót és tetőt is.
5. A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kezelés körülbelül 1 percet vesz igénybe.
6. Vegye ki a készüléket a kaptárból. Győződjön meg arról, hogy a járat nyílása további 10 percig zárva maradjon.

**MEGJEGYZÉS:** Miután kivette a készüléket a kaptárból, a készülék eltávolítható tégelyét egy vödör vízbe kell ejteni, hogy a következő használat előtt lehűljön.